

EXTEND-A-COOL®



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT TRANSDERMIQUE

TROUSSE DE BANDAGE

CONTENU

Deux emballages de feuilles « Extend-A-Cool », deux feuilles par emballage (8"x 11" / 20cm x 28cm)
Un emballage de bandage « Extend-A-Cool », quatre bandages par emballage (8.5"x 11" / 21.5cm x 28cm)

Prolonguez votre thérapie de refroidissement jusqu'à six heures - n'importe où, n'importe quand:

- Lors d'une compétition
- En voyage
- À l'écurie
- Dans la trousse de secours

PRODUIT POUR ANIMAUX À USAGE EXTERNE UNIQUEMENT NE PAS UTILISER SUR L'HOMME

« Extend-A-Cool » est une feuille de refroidissement transdermique.

- Aide à soulager les douleurs du tibia et des calcifications ainsi que l'inflammation des muscles et tendons due à une activité intense.
- Aide à réduire l'enflure et l'inconfort résultant d'entorses et de contusions aiguës.
- Sans produits chimiques nocifs.
- Pratique et simple à utiliser.

L'efficacité du système « Extend-A-Cool » dépend de son utilisation correcte.

Circulation d'air appropriée

- Le système « Extend-A-Cool » repose sur le principe de l'évaporation. Le bandage est conçu pour favoriser la circulation d'air afin de stimuler une efficacité maximale de la feuille de refroidissement.


Contact uniforme

- Le bandage « Extend-A-Cool » fournit un soutien uniforme et permet un contact homogène de toute la feuille sur la jambe du cheval. Ceci permet un maximum de refroidissement.

Bon rapport coût / efficacité

- Le bandage « Extend-A-Cool » est facile à utiliser. La toile est durable, ce qui permet un usage multiple.

MODE D'EMPLOI

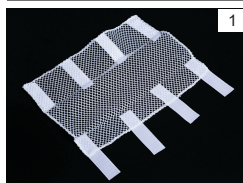

1

Déplier un bandage en toile et le poser sur une surface plate.



2

Retirer une feuille de refroidissement de l'emballage et la poser côté tissu sur le bandage; le côté gel vers le haut.



3

Enlever la couche de protection transparente.



4

Enrouler le bandage délicatement autour de la jambe du cheval. Le gel doit être en contact direct avec la peau.



5

Maintenir en place fermement au moyen des bandes velcro.

Remarque: Les bandages qui ne permettent pas une bonne circulation d'air devraient être évités. Afin d'éviter une contamination bactérienne, veuillez jeter la feuille de refroidissement après usage. Le bandage en toile peut être réutilisé.




Commercialisé par:

Horses In Harmony
Alberta, Canada

info@horsesinharmony.ca

POUR AGRANDIR LE BANDAGE EN TOILE

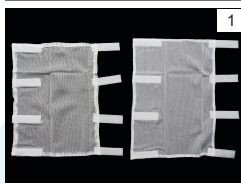

1

Poser deux bandages en toile l'un à côté de l'autre.



2

Attacher les bandes velcro ensemble le long du côté de chaque bandage en toile, créant un bandage extra grand.



3

Poser une feuille de refroidissement sur le bandage; le côté gel vers le haut. Enlever la couche de protection transparente.



4

Enrouler le bandage autour de la jambe du cheval. Le gel doit être en contact direct avec la peau. Maintenir en place fermement au moyen des bandes velcro.



5



6

Utiliser du ruban électrique ou autre ruban étroit pour maintenir les bandes velcro fermement autour de la jambe du cheval (particulièrement si les bandes ne se touchent pas directement).

Visitez notre site web à www.horsesinharmony.ca